

Dermabond colle cutanée - 0,5 ml (12 pcs)

Art: 9101132 | Marque: [ETHICON](#)

BARTHEL'S

406,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

DERMABOND est **une colle cutanée avancée** qui peut être utilisée comme **alternative à une suture** pour fermer une plaie.

AVANTAGES

- Forme une **couche anti-bactérienne** qui protège la plaie pendant 72 heures.
- L'application prend 1 minute, ce qui permet **de fermer les plaies plus rapidement** que les sutures classiques.
- Pour **des enfants**, la colle est moins effrayante que le fil et l'aiguille.
- L'anesthésie locale n'est pas nécessaire.
- En 4 minutes, le Dermabond protège également la plaie contre l'eau, donc **la douche n'est pas un problème** (ne pas nager !).
- Esthétiquement, vous obtenez un meilleur résultat qu'avec une suture classique.

- Conservation jusqu'à 30° maximum (pas nécessairement au réfrigérateur).

COMMENT L'APPLIQUER ?

- **Nettoyer et désinfecter la plaie.**
- Casser l'ampoule de Dermabond en la pressant fortement entre le pouce et l'index - **il ne vous reste plus que quelques minutes pour l'appliquer !**
- Veillez à ce que **les bords de la plaie soient bien rapprochés** (en position horizontale).
- Appliquer **une première couche** et laisser sécher pendant 30 secondes.
- Appliquer **une deuxième couche** et laisser sécher pendant 30 secondes, puis **maintenir les bords de la plaie ensemble pendant 60 secondes.**
- Prêt !

Avec 1 ampoule de 0,50 ml, vous pouvez fermer une plaie d'environ 5 - 6 cm de long (max.).

Après 5 minutes, une compresse peut être appliquée pour protéger la blessure des chocs ou des frottements.

UNE BLESSURE PROFONDE ?

- Si la plaie est trop profonde, **une suture sous-cutanée** est en outre nécessaire avant la fermeture superficielle (comme pour une fermeture complète avec des sutures).
- L'intention **n'est pas de laisser l'adhésif s'infiltrer dans la plaie**, mais seulement de l'appliquer superficiellement.

BLESSURE HUMIDE OU SALE ?

- C'est une **contre-indication** pour le Dermabond.