

OUTIL D'AIDE À L'ENFILAGE DES BAS DE COMPRESSION

MEMBRANE ÉLASTIQUE REMPLIE D'EAU SAVONNEUSE

PROPOSÉ DANS SON SAC DE RANGEMENT

ROLLY



Enfile bas souple, pour la pose et le retrait
des bas et des chaussettes de compression,
sans effort et dans un confort optimal.

BÉNÉFICES / CARACTÉRISTIQUES

Pose et retrait efficace

Nouvelle technique utilisable
seul ou par un tiers.

Réajustement de la pose

Surface striée "adhésive"
permettant de déplacer la
matière du bas sans l'abîmer.
Idéale pour supprimer les
petits plis, bien positionner le
talon etc.

Pratique

Compact et déformable, il est
facilement transportable et se
glisse dans un sac de voyage.

Facilité d'entretien

Lavable à l'eau savonneuse.
Nettoyage possible à l'aide
d'un désinfectant.

Option :

CÔNE

Outil pour rouler
facilement un bas
de compression sur
le Rolly.



PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ

EN CAS DE :

Perte de dextérité - Arthrite - Arthrose -
Bandage, pansement - Ulcère - Grossesse -
Surpoids, obésité - Manque de souplesse -
Port de Classe 3

SIGVARIS
GROUP

MODE D'EMPLOI



1 Enfilez le bas à l'endoit, sur le bras. Bien étirer le bas pour éviter les plis.



2 Enfilez le Rolly jusqu'au bout du bas en le faisant rouler.




3 Attrapez le bout du bas et faites le passer par dessus le Rolly en tirant vers le bas. Remontez le Rolly pour pouvoir coincer le bout du bas sous la base.



4 Faites rouler le Rolly jusqu'au bout de la main en enroulant le bas.



5 Terminez d'enrouler le bas jusqu'à apercevoir la pointe du pied du bas : celle-ci doit être bien tendue.

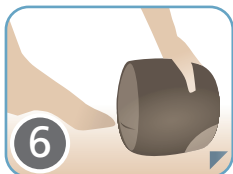

6 Placez la pointe du bas contre la pointe de votre pied en veillant à ce que le talon du bas soit en dessous.



7 Enfoncez votre pied dans le Rolly en le laissant se dérouler. Passez le talon et découlez le Rolly jusqu'au bout du bas.



8 Retirez le Rolly en le laissant rouler, utilisez sa surface striée pour ajuster la pose et répartir la matière.

ROLLY
ENFILE BAS SOUPLE

COMPOSITION

MEMBRANE :

SEBS, huile de paraffine, pigments de couleur.

LIQUIDE :

eau, savon liquide, polyacrylamide, bactéricide.

Découvrez le Rolly chez votre distributeur.



SIGVARIS
GROUP