

Vorbereiding installatie onderzoekslamp

Na de aankoop van een onderzoekslamp is het de verantwoordelijkheid van de klant om de zaken die in dit document beschreven worden in orde te brengen voor de installatie. Indien deze zaken niet in orde zijn gebracht, zal onze medewerker de onderzoekslamp niet kunnen installeren.

Technische specificaties onderzoekslampen

Dr. Mach 120/120F

- Opgenomen vermogen: 18 W
- Werkspanning: 24 V DC
- Stroomsterkte: 0,75 A
- Maximale kracht: 12,8 kg

Dr. Mach 130/130F

- Opgenomen vermogen: 28 W
- Werkspanning: 24 V DC
- Stroomsterkte: 1,2 A
- Maximale kracht: 13,4 kg


Welch Allyn GS900

- Werkspanning: 100 – 240 V (afhankelijk van transformator)
- Stroomsterkte: 1,25 A
- Maximale kracht: 15 kg

Voorzieningen onderzoekslampen met plafondfixatie

Elektriciteit

Voor alle onderzoekslampen met plafondfixatie dient er een elektriciteitspunt voorzien te worden. Dit elektriciteitspunt dient om de elektrische aansluiting, zoals hieronder afgebeeld, te volbrengen.

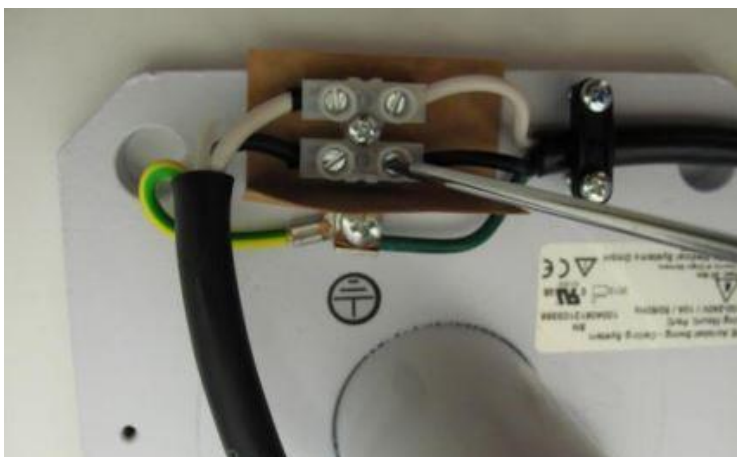

Fixatie

Indien u over een vals plafond beschikt, is een versterking noodzakelijk om de onderzoekslamp te bevestigen. Deze versterking dient een OSB- of MDF-plaat te zijn van **minstens 40 cm x 40 cm**.

- In het geval van een vals plafond dat nog niet dicht is gemaakt of makkelijk te openen valt (vb. tegelplafond) kan de plaat op het ijzeren frame bevestigd worden.



- In het geval van een vals plafond dat reeds is dichtgemaakt dient de plaat rechtstreeks op het vals plafond bevestigd te worden. Het is voor de esthetische waarde raadzaam deze plaat in dezelfde kleur als uw plafond te schilderen.



In het geval van een betonnen plafond kan de lamp rechtstreeks in het beton gefixeerd worden.



Lokalisatie

U bent als klant zelf verantwoordelijk voor de lokalisatie van de onderzoekslamp.

Raadzaam is om deze rechtstreeks boven uw onderzoekstafel te plaatsen zodat u een zo groot mogelijk deel van uw onderzoekstafel optimaal kunt belichten (zie foto onder).


- Idealiter bevindt de lamp zich centraal, lichtjes gesitueerd naar het hoofdeinde van de tafel.
- In het geval van gynaecologisch onderzoek is het raadzaam de lamp meer naar het voeteinde te plaatsen.




Bij twijfel over de lokalisatie kan u altijd contact opnemen met uw vertegenwoordiger voor advies.

Technische tekeningen

Dr. Mach 120/120F/130/130F

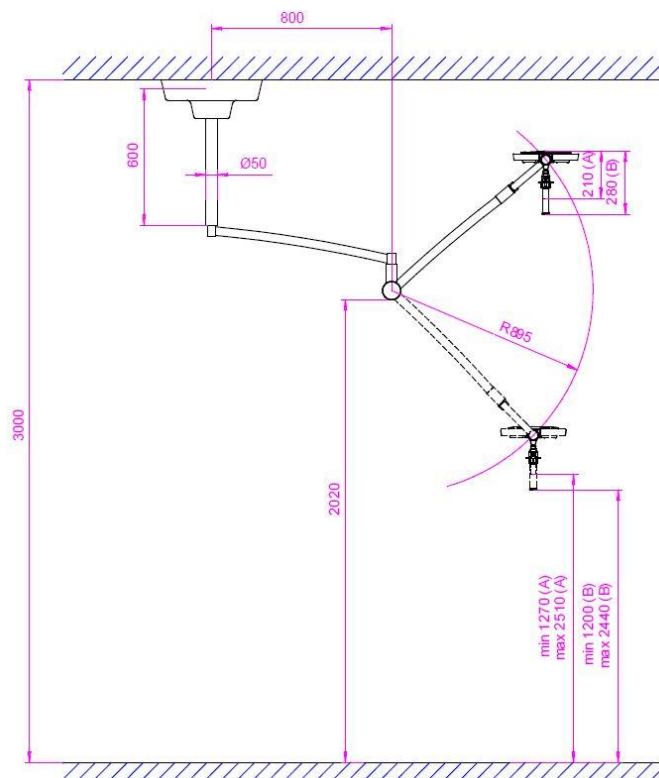


Welch Allyn GS900

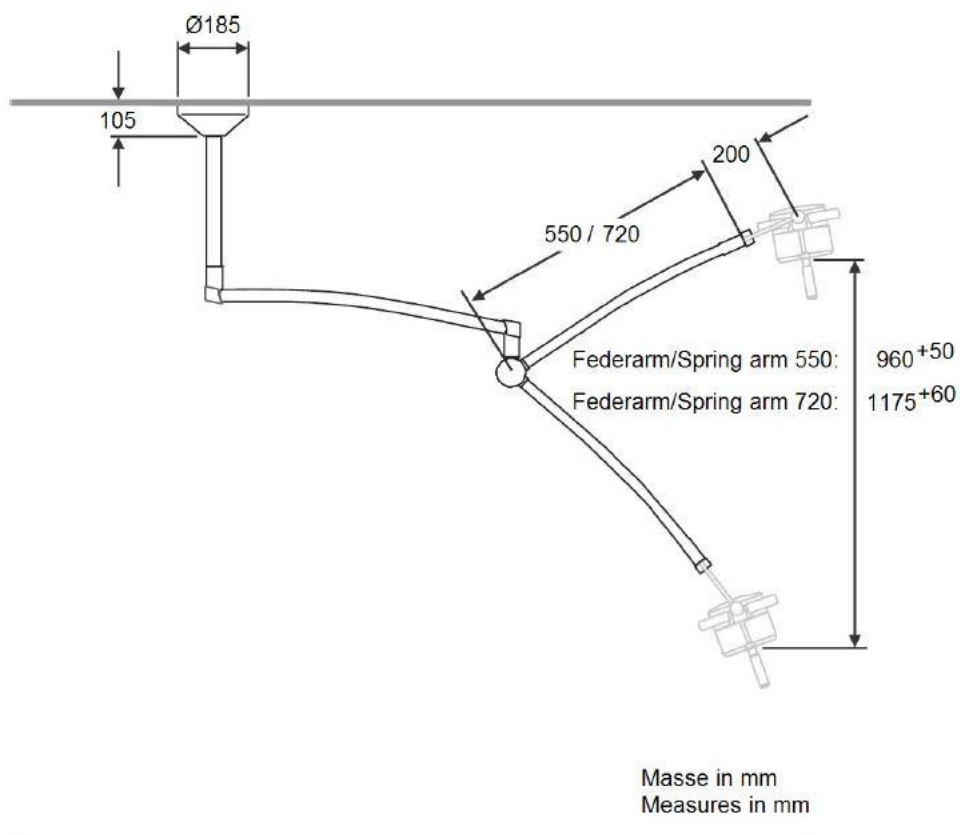


Fixatie

Dr. Mach 120/120F/130/130F

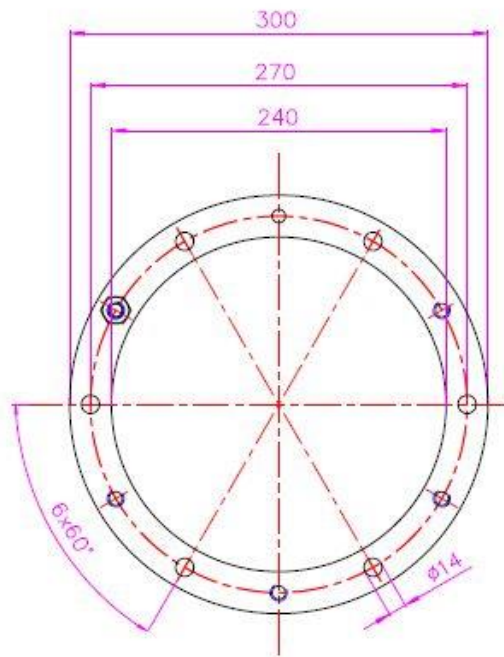

Welch Allyn GS900 (vierkant)

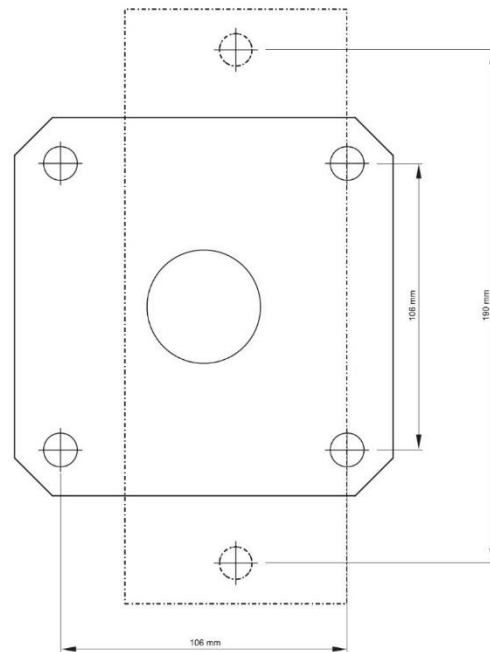

Voorzieningen onderzoekslampen met wandfixatie



Elektriciteit

Voor alle onderzoekslampen met wandfixatie dient er een stopcontact voorzien te worden. De wandlampen worden voorzien van stroom a.d.h.v. een gewone netsnoer die tot op maximaal 10m van het stopcontact kan gebruikt worden.

Fixatie

Indien de onderzoekslamp op een valse (bv. Gyproc) muur wordt bevestigd, is een versteviging d.m.v. een OSB- of MDF-plaat vereist. Deze dient **minstens 20 cm x 40 cm** groot te zijn.

Zie stippellijnen voor fixatieplaat onderzoekslamp met muurbevestiging.

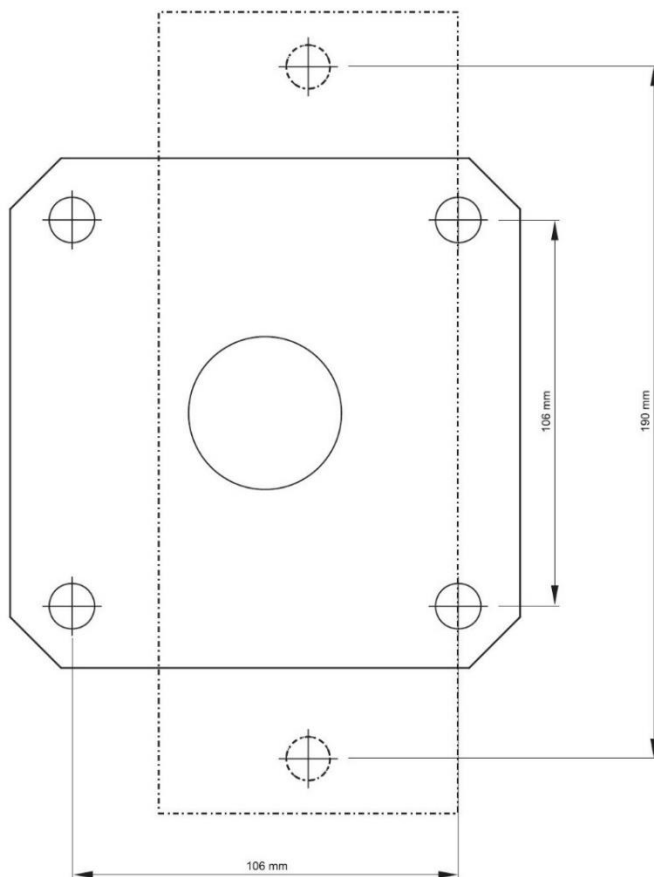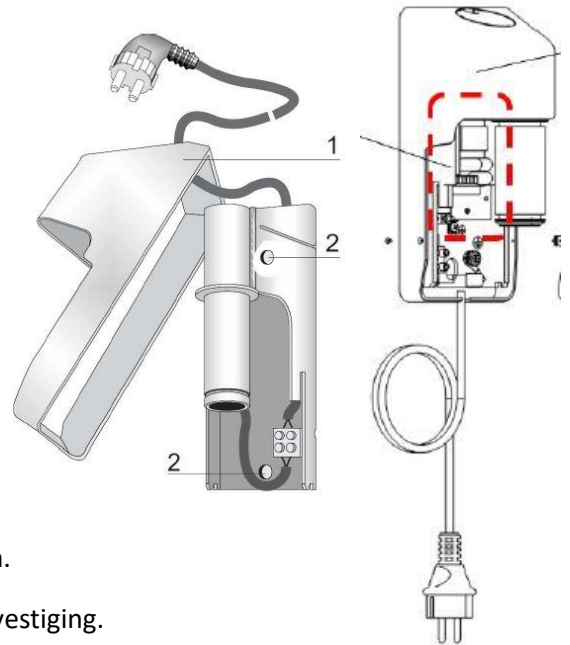


Lokalisatie

De lokalisatie van wandlampen is zeer ruimte specifiek.


Bij twijfel over de lokalisatie kan u altijd contact opnemen met uw vertegenwoordiger voor advies.

Technische tekeningen


Dr. Mach 120/120F/130/130F

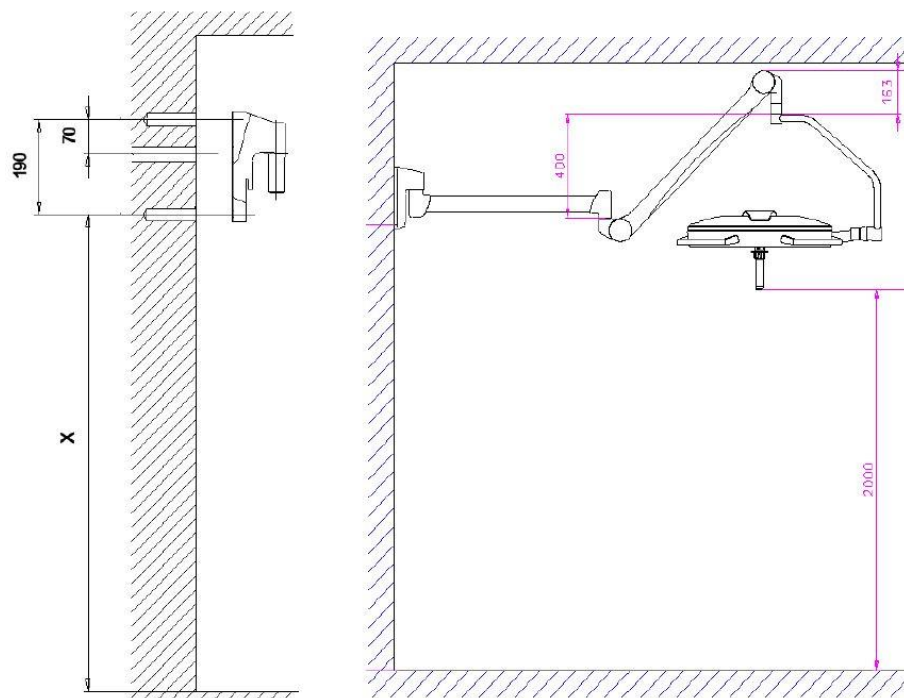


Welch Allyn GS900

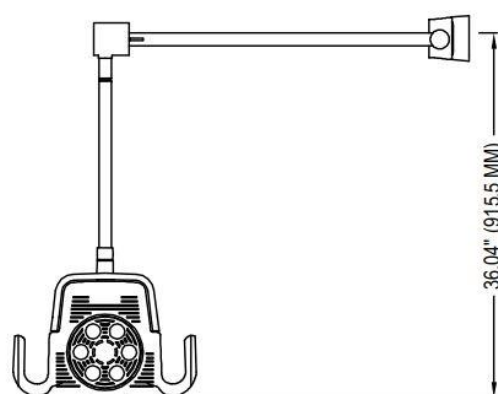

BOTTOM VIEW

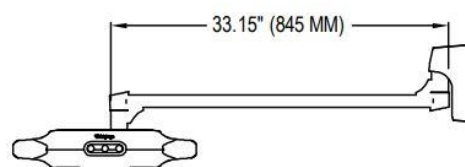

FRONT VIEW

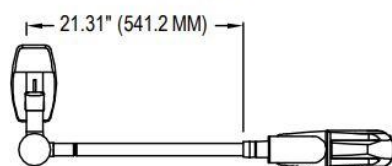

SIDE VIEW