

Aansluiten van de uitbreiding




Uitbreiding

Met de uitbreiding kan het beenmanchet of de compressiebroek met 13 cm verlengd worden. Deze wordt met ritssluitingen aan de zijkant bevestigd.

Plaatsen

De uitbreiding wordt als volgt geplaatst:

Zodra u de overlap van het manchet opent, worden de aansluitingen voor de slangen zichtbaar. **Slang van de vierde luchtkamer op de gemarkeerde plaats (zwarte streep) losmaken** en het verbindingstuk van de uitbreiding aansluiten.

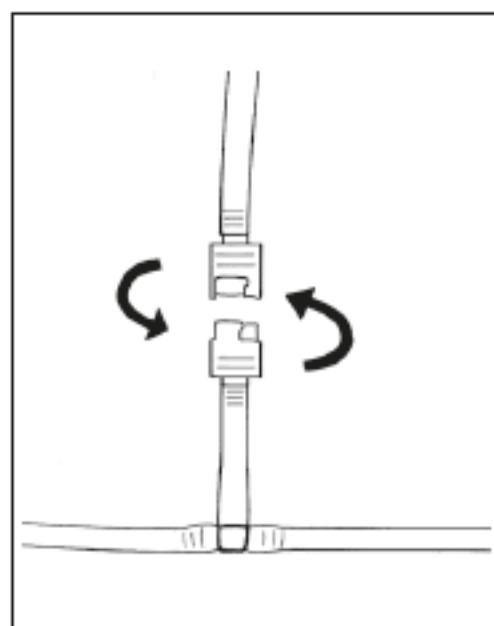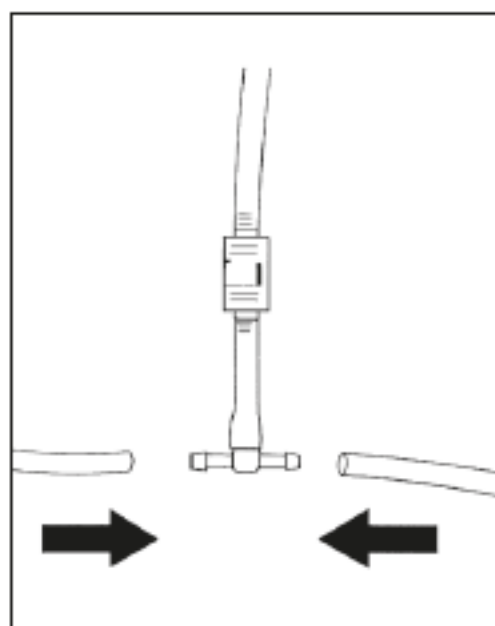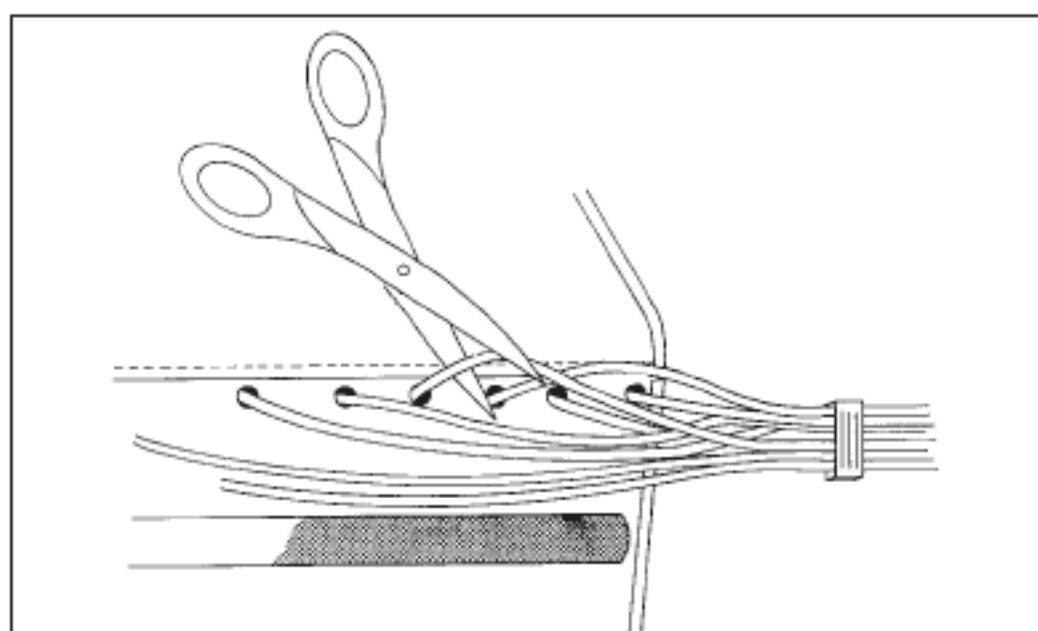

Om de uitbreiding te verwijderen deze losmaken bij de aansluiting van de slang.

Raccordement de l'extension




Extension

L'extension permet d'obtenir un agrandissement de la circonférence du manchon de jambe/pantalon de compression de 13 cm. Sa fixation est assurée par les fermetures Éclair latérales.

Consigne de montage

L'extension doit être mise en place de la manière suivante :

Lors de l'ouverture du cache en tissu latéral du manchon, les raccords de tuyau deviennent alors apparents. **Séparez le tuyau de la chambre à air n° 4 au niveau du marquage (trait noir)** et raccordez le connecteur de l'extension.

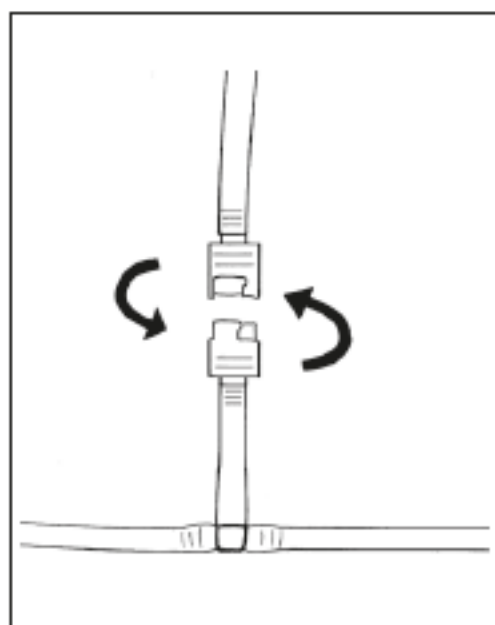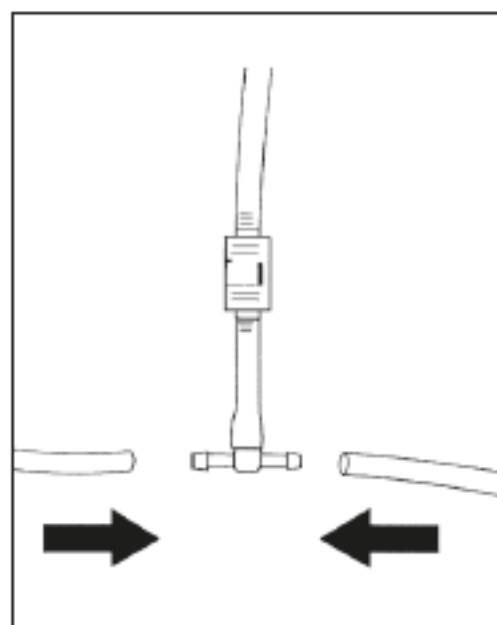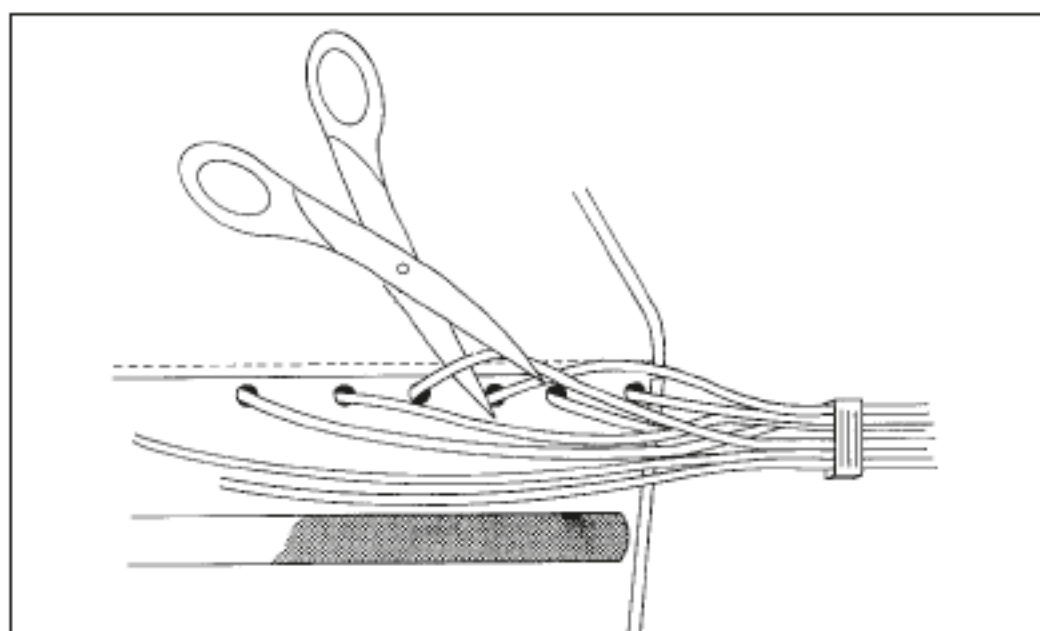

Lors du retrait de l'extension, retirez ce connecteur du raccord de flexibles.