

WASINSTRUCTIES LYMPHA-MAT MANCHETTEN

gymna

ZEER BELANGRIJK

1. Er mag **GEEN** water in de manchets komen via de luchtslangen.
2. **Na het buigen van alle luchtslangen (zie foto) gebruikt u bv. een kabelbinder om de slangen af te dichten.**
3. Bij het wassen in een badkuip / wasbak mogen de slangen met het koppelstuk niet in het water vallen, stekker eventueel afsluiten met een plastic zak **tenzij u punt 2 toepast.**
4. **NIET STRIJKEN - NIET IN DE DROOGKAST.**

WASMACHINE

- Slangen moeten worden afgesloten (zie 2 hierboven).
- Vlekkenverwijderaar op vlekken spuiten en laten inwerken.
- Eventueel vlekkenpoeder toevoegen in het compartiment.
- Mild wasmiddel toevoegen in het compartiment.
- **GEEN WASVERZACHTER GEBRUIKEN.**
- Instellen op 30°C gekleurde was.
- Zwieren > max. 400 toeren, anders **NIET ZWIEREN.**
- Manchet druipnat ophangen.

HANDWAS

- In bad of wastafel.

BELANGRIJK: zie 2 en 3 hierboven.

- Vlekkenverwijderaar op vlekken spuiten en laten inwerken.
- Mild wasmiddel gebruiken, watertemperatuur ca. 30°C.
- Hardnekkige vlekken lichtjes behandelen met een borstel.
- Manchet druipnat ophangen.

