

# INSTRUCTIONS DE LAVAGE MANCHETTES LYMPHA-MAT *gymna*

## TRÈS IMPORTANT

1. **AUCUNE EAU** ne doit pénétrer dans la manchette par les tuyaux d'air.
2. **Après avoir plié tous les tuyaux d'air (voir photo), utilisez p. ex. un collier de serrage pour sceller les tuyaux.**
3. Lors du lavage dans une baignoire / un lavabo, les tuyaux avec le connecteur **ne doivent pas tomber dans l'eau**, év. couvrir la fiche avec un sac en plastique si nécessaire, **sauf si vous appliquez le point 2.**
4. **NE PAS REPASSER - NE PAS SÉCHER EN MACHINE.**

## MACHINE A LAVER

- Les tuyaux doivent être étanches (voir 2 ci-dessus).
- Vaporisez du détachant sur les taches et laissez agir.
- Si nécessaire, ajoutez de la poudre détachante dans le compartiment.
- Ajoutez un détergent doux dans le compartiment.
- **NE PAS UTILISER D'ASSOUPLEISSANT.**
- Régler à 30°C pour le lavage en couleur.
- Essorer > 400 tr/min maximum, sinon **NE PAS** essorer.
- Suspendre la manchette mouillée.

## LAVAGE À LA MAIN

Dans une baignoire ou un lavabo.

IMPORTANT : voir 2 et 3 ci-dessus.

- Vaporisez du détachant sur les taches et laissez agir.
- Utiliser un détergent doux, température de l'eau environ 30°C.
- Traiter légèrement les taches tenaces à l'aide d'une brosse.
- Suspendre la manchette mouillée.

