

DermaBOND huidlijm - mini - 0,36 ml (12 st)



Art: 9102132 | Merk: [ETHICON](#)



Productinformatie

DERMABOND is een **geavanceerde huidlijm** die ingezet kan worden als alternatief voor een hechting om een wond te sluiten. **VOORDELEN**

- Het brengt een **anti-bacteriële laag** aan die gedurende 72 uren de wonde afschermt
- De applicatie duurt 1 minuut waardoor **het snellere methode is om wonden te sluiten dan klassieke hechting**
- Voor **kinderen** is lijm minder schrikwekkend dan naald en draad
- Plaatselijke verdoving is niet nodig
- Binnen de 4 minuten beschermt Dermabond eveneens de wonde tegen water waardoor **douchen geen probleem** vormt (niet zwemmen!)
- Esthetisch krijgt u een beter resultaat in vergelijking met een klassieke hechting
- Bewaren tot max 30° (dus niet noodzakelijk in de koelkast)

HOE AANBRENGEN?

- Zorg voor een **goede reiniging en ontsmetting** van de wonde
- Breek de Dermabond ampulle door hard te knijpen tussen duim en wijsvinger - nu heeft u **nog slechts enkele minuten tijd** om aan te brengen!
- Zorg ervoor dat **de wondranden goed tegen elkaar komen** (in een horizontale positie)
- Breng een **eerste laag** aan en laat deze 30 seconden drogen
- Breng een **tweede laag** aan, laat deze 30 seconden drogen en **hou de wondranden gedurende nog 60 seconden samen**
- Klaar!

Met 1 ampoule van 0,36 ml kan u een wonde sluiten tot ongeveer 4 cm lang. Na 5 minuten mag een kompres/windel aangebracht worden om de wonde te beschermen tegen schokken of krabben aan de wonde door de patiënt. **DIEPE WONDE?**

- Wanneer de wonde te diep is, **is een onderhuidse hechting bijkomend nodig** vooraleer oppervlakkig te sluiten (net zoals bij een volledige sluiting met hechtingen)
- Het is **niet de bedoeling om de wondlijm in de wonde te laten sijpelen**, enkel oppervlakkig toe te passen

VOCHTIGE OF VUILE WONDE?

- Dit is een contra-indicatie voor Dermabond