

Freezpen starterset cryotherapie - 16 g



Art: 511231 | Merk: [FREEZPEN](#)



Productinformatie

FREEZPEN is een krachtig maar eenvoudig cryochirurgie-instrument voor de behandeling van een veelheid van **goedaardige huidletsels** zoals wratten, fibromen, moedervlekken, pigmentvlekken, keratosen, angiomen, ...

De Freezpen werkt met vervangbare N2O cartridges van 16g. De behandeling met **vloeibare stikstof** is uiterst **kosteneffectief** en behandelt letsels **permanent**, in slechts enkele seconden.

VOOR ELKE BEHANDELAAR

- Freezpen is er voor iédere professionele behandelaar.
- elke behandeling duurt slechts **enkele seconden**.
- uitstekend rendement: tot 10 behandelingen per N2O patroon van 16g.

KRACHTIG

- microjet met hoog vermogen (50-55 bar).
 - penetratie 1 mm / 5 sec.
 - maximale diepte 6 mm.
- bereikt een temperatuur van **-89°C in het weefsel**.
- volledige weefselnecrose in enkele seconden.

PIJNLOOS

- geen pijn, geen snijwonden of bloedingen.
- geen verdoving nodig, **ook niet voor kinderen**.
- een lichte prik geeft aan wanneer de behandeling voltooid is.

PRECIES

- ultrafijne scherpe straal voor totale precisie.
- **geen beschadiging van gezond weefsel**.
- bevroren weefsel **verdwijnt in enkele weken**.

- geen littekens.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EN PRAKTISCH

- beoordeel de laesie, kies de juiste applicator, **wijs aan, bevries**, veeg af, bevries opnieuw: klaar!
- makkelijk te hanteren en mee te nemen.
- handige N2O wegwerppatronen.

FAVORIETE CRYO BEHANDELINGSHULPMIDDEL

- voor u, omdat het een geweldig, gemakkelijk te gebruiken instrument is, dat **keer op keer geweldige resultaten oplevert**.
- voor uw patiënten: eenmaal geprobeerd willen zij hun ongewenste laesies alleen nog maar laten behandelen met Freezpen.

3 VERSCHILLENDE APPLICATOREN

- **blauw:** applicatie 1 > 3 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 230 > 270 sec.
- **wit:** applicatie 2 > 6 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 145 > 180 sec.
- **groen:** applicatie 4 > 8 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 110 > 130 sec.

N2O CARTRIDGES 16g

- bewaren op **kamertemperatuur**.
- nabestellen per stuk.

INHOUD

- **Starterset Freezpen 16 g**
 - Freezpen + blauwe applicator 1-3 mm + witte applicator 2-6 mm + groene applicator: 4-8 mm
 - + 6 N2O patronen 16g + tafelhouder + pincet voor vervangen N2O cartridge + opbergkoffertje.