

# DermaBond huidlijm - 0,5 ml (12 st)



Art: 9101132 | Merk: ETHICON



## Productinformatie

DERMABOND is een **geavanceerde huidlijm** die ingezet kan worden als alternatief voor een hechting om een wond te sluiten.

### VOORDELEN

- Het brengt een **anti-bacteriële laag** aan die gedurende 72 uren de wonde afschermt.
- De applicatie duurt 1 minuut waardoor **het snellere methode is om wonden te sluiten dan klassieke hechting**.
- Voor **kinderen** is lijm minder schrikwekkend dan naald en draad.
- Plaatselijke verdoving is niet nodig.
- Binnen de 4 minuten beschermt Dermabond eveneens de wonde tegen water waardoor **douchen geen probleem** vormt (niet zwemmen!).
- Esthetisch krijgt u een beter resultaat in vergelijking met een klassieke hechting.
- Bewaren tot max 30° (dus niet noodzakelijk in de koelkast).

### HOE AANBRENGEN?

- Zorg voor een **goede reiniging en ontsmetting** van de wonde.
- Breek de Dermabond ampul door hard te knijpen tussen duim en wijsvinger - nu heeft u **nog slechts enkele minuten tijd** om aan te brengen!
- Zorg ervoor dat **de wondranden goed tegen elkaar komen** (in een horizontale positie).
- Breng een **eerste laag** aan en laat deze 30 seconden drogen.
- Breng een **tweede laag** aan, laat deze 30 seconden drogen en **hou de wondranden gedurende nog 60 seconden samen**.
- Klaar!

**Met 1 ampul van 0,50 ml kan u een wonde sluiten tot ongeveer 5 - 6 cm lang.** Na 5 minuten mag een kompres/windel aangebracht worden om de wonde te beschermen tegen schokken of krabben aan de wonde door de patiënt.

#### DIEPE WONDE?

- Wanneer de wonde te diep is, **is een onderhuidse hechting bijkomend nodig** vooraleer oppervlakkig te sluiten (net zoals bij een volledige sluiting met hechtingen).
- Het is **niet de bedoeling om de wondlijm in de wonde te laten sijpelen**, enkel oppervlakkig toepassen.

#### VOCHTIGE OF VUILE WONDE?

- Dit is een **contra-indicatie** voor Dermabond.